

Préparation du lit de la plaie

Prontosan® Débridement Pad

Un débridement en douceur pour les plaies complexes

SIMPLIFIEZ-VOUS LE
DÉBRIDEMENT !

Couche absorbante
permet le retrait
d'exsudat excédentaire.



Microfibres
permettent l'élimination
des dépôts et résidus de
cellules mortes (débris)
de la plaie.

Prontosan® Débridement Pad en pratique

1



Imbiber avec
15 à 20mL de
Prontosan® Solution*,
directement dans son
emballage, sur la face
non imprimée.

2



Essuyer la plaie et/ou la peau environnante
avec la face humidifiée, en exerçant une
pression douce et en effectuant des
mouvements circulaires.



La partie large est utilisée pour le
nettoyage du lit de la plaie.



Le côté étroit permet le nettoyage
des zones difficiles d'accès et des
cavités.

3



Rincer soigneusement la plaie avec Prontosan®
Solution* après le débridement et poursuivre le
protocole de soin habituel.

DÉSIGNATION	GTIN	CDT	RÉFÉRENCE
Prontosan® Débridement Pad	7612449149757	3	3908456
Prontosan® Débridement Pad	7612449149801	10	3908457

Prontosan®

Détersion des plaies

Nettoyage, rinçage et hydratation des plaies cutanées aiguës, chroniques infectées ou non infectées, et des brûlures du 1^{er} et 2nd degré, jusqu'au 3^{ème} degré pour Prontosan® Wound Gel et Prontosan® Wound Gel X.



Prontosan® Solution

Bouteille 1000mL
Bouteille 350mL

En rinçage ou en compresse imbibée

Prontosan® Wound Gel X

Tube 250g
Tube 50g

Plaies planes/étendues

Prontosan® Wound Gel

Unidose 30mL

Plaies cavitaires/profondes

Bouchon instillateur Prontosan®

à utiliser avec Prontosan® 1000 mL pour la TPN

(Thérapie par Pression Négative)

DÉSIGNATION	GTIN	CDT	RÉFÉRENCE
Prontosan® Bouteille 1000 mL	7612449130953	1	400446
Prontosan® Bouteille 350 mL	4039239517955	1	400403
Prontosan® Bouchon. Adapt. Instillat.	7612449140365	10	3908437
Prontosan® Wound Gel X 250 g	4046963840174	1	400508
Prontosan® Wound Gel X 50 g	4046964093425	1	400517
Prontosan® Wound Gel 30 ml	4039239517993	1	400505

Peut être associé à d'autres pansements.

Une fois ouvert, Prontosan® Solution, Prontosan® Wound Gel X et Prontosan® Wound Gel peuvent se conserver jusqu'à 8 semaines (pour un seul et même patient, à condition que l'embout de la bouteille/du tube n'ait pas été en contact direct avec la plaie).