

Pompe respiratoire HK pour veaux #1032

La pompe respiratoire HK du vétérinaire Dr Bron est adaptée à l'extraction des glaires de la bouche et du nez des veaux nouveau-nés et pour faciliter la circulation sanguine après des vêlages particulièrement difficiles.

1. Extraction des glaires de la bouche et du nez chez les veaux nouveau-nés.

Une importante quantité de glaires dans la bouche et le nez des veaux peut conduire à des problèmes considérables lors des premiers mouvements respiratoires du veau, même jusqu'à la mort. L'extraction des glaires à la main est alors absolument insuffisante. La pompe respiratoire HK permet de remédier à ce problème. Appuyer avec une légère pression l'ouverture du manchon en caoutchouc sur la bouche et le nez, puis aspirer les glaires par une traction sur la poignée-étoile. Retirer ensuite la pompe respiratoire HK et l'orienter sur le côté. En appuyant sur la poignée étoile, le piston à l'intérieur de la pompe respiratoire HK est ramené vers le bas et les glaires aspirées s'écoulent. Répéter ce processus plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à avoir aspiré l'essentiel des glaires.

2. Facilitation rapide de la circulation sanguine après les vêlages particulièrement difficiles. Le vêlage est un processus très éprouvant pour la vache et le veau. Lors des vêlages difficiles liés à des contractions trop faibles, un mauvais positionnement du veau ou un veau de trop grande taille, la pression exercée pendant un certain temps sur la poitrine du veau peut avoir une influence décisive sur l'avenir du nouveau-né. Le déploiement des poumons et l'enclenchement d'une activité respiratoire normale peuvent être assistés considérablement par la pompe respiratoire HK. Pour la ventilation et la facilitation de la respiration, tirer sur la poignée-étoile pour sortir jusqu'à la butée le piston à l'intérieur de la pompe respiratoire HK. Placer ensuite le manchon en plastique sur le nez et la bouche du veau, puis appuyer lentement la poignée-étoile vers le bas. Répéter ce processus plusieurs fois si nécessaire.

Consigne importante : Nettoyer et désinfecter soigneusement la pompe respiratoire HK après chaque utilisation. Stocker au propre et au sec.

Nous accordons une garantie selon nos conditions de garantie générales.